

1

お申込み完了

口座振替手続き完了後、ユーザー ID、パスワードが発行されます。

2

ログインする

ログイン画面にて、ユーザー ID、パスワードを入力し、ログインします。

3

接続ソフトインストール

トップページの、AS-2000 用ドライバをインストールします。
1) USBドライバをダウンロードをします。
2) スキャナー接続ソフトをダウンロードします。
ダウンロードしたソフトをインストールして完了です。

- 1) AS-2000用: USBドライバダウンロード(XP用/Vista)
- 2) AS-2000用: スキャナー接続ソフト
- AS-2000用: USBインストールマニュアルダウンロード
- AS-2000用: JMCマイクロチップ挿入器(インジェクター)取扱説明書
- AS-2000用: スキャナーによるマイクロチップへの書込みの手順

4

スキャナとPC 接続

スキャナとPCの接続が設定完了。
※接続が失敗している場合は、ランプが消えます。

5

マイクロチップ読込

スキャナとPCを接続した状態で、マイクロチップが挿入された動物種(犬、猫)を選択します。
次に画面の読込ボタンを押します。
スキャナが読み取りモードに切り替わります。
読み取りが成功すると、カルテ画面が切り替わります。

※2回ピピと音が鳴ります。

6

マイクロチップ書込

読み取りが成功すると、カルテ画面に書込みボタンが表示されます。
必要情報を入力後、書込みボタンを押します。
スキャナが書込みモードに切り替わります。
マイクロチップが挿入された、部位にスキャナあてて、書込みボタンを押して書込み完了します。

※2回ピピと音がなります。